

TABELLA MISURE BENDAGGIO S.O. BAND

Per determinare la misura del tutore, passare il metro sul paziente come se si stesse indossando il tutore stesso.


MISURA	S	M	L	XL
	Cm 190	Cm 230	Cm 280	Cm 320

Applicazione: posizionare il braccio in abduzione contro il torace, con il gomito flesso a 90° e con l'avambraccio in posizione orizzontale a livello della vita.


1. circondare il polso con il bendaggio e fissarlo un poco più in alto con la chiusura in velcro.



2. Far passare il bendaggio sulla spalla sana e poi obliquamente dietro la schiena, girare attorno al tronco passando al di sotto dell'arto lesa.

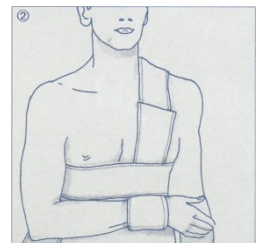

3. Circondare il braccio dal lato lesa appena al di sopra della piega del gomito, passando dal dietro all'avanti.

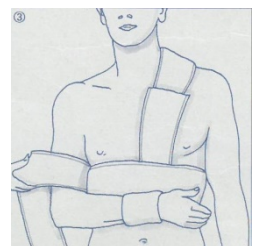

4. Fissare l'estremità posteriore.

